

# Leitfaden zum Wechsel des Biogel® Indicator® Systems

## OFFENE ANZIEHTECHNIK

### Ziehen Sie den sterilen OP-Mantel an und öffnen Sie die Handschuh-Verpackung wie empfohlen\*



1. Nehmen Sie den ersten farbigen Handschuh mit Ihrer nicht-dominanten Hand aus dem inneren Einschlagpapier. Legen Sie Daumen und Zeigefinger der anderen Hand auf die Falte der umgekrempelten Manschette in einer Linie mit der Handfläche des Handschuhs und ziehen Sie den Handschuh über die Hand.



2. Lassen Sie die Manschette umgekrempelt.



3. Nehmen Sie den zweiten farbigen Handschuh aus der Packung, indem Sie die behandschuhten Finger unter die umgekrempelte Manschette legen. Führen Sie die nicht behandschuhte Hand mit ausgestreckten Armen und leicht gebeugten Ellbogen in den Handschuh ein.



4. Ziehen Sie den Handschuh über das Bündchen des OP-Mantels, indem Sie den Arm leicht nach außen und innen drehen.



5. Ziehen Sie den Handschuh in die richtige Position. Achten Sie darauf, dass der angezogene Handschuh das Bündchen des OP-Mantels immer vollständig und mit einem Abstand von etwa 10 cm bedeckt. Verfahren Sie genau so mit der anderen Hand.



6. Öffnen Sie den Einschlag des strohfarbenen Außenhandschuhs. Schieben Sie die Finger des farbigen Handschuhs in den Außenhandschuh und dehnen Sie ihn, damit er bequem und komfortabel sitzt. Ziehen Sie den Handschuh in die richtige Position und wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Außenhandschuh.



7. Achten Sie darauf, dass der Außenhandschuh gut über den Innenhandschuh gezogen ist (ca. 2,5 cm), um ein Herunterrollen oder -rutschen zu vermeiden. Drücken Sie das Ende der Handschuhmanschette fest gegen den OP-Mantel, damit das Anti-Rutsch-Band des Handschuhs Halt findet.



8. Strecken Sie nach dem finalen Anziehen und eventuellen Anpassungen Ihre Arme und stellen sicher, dass die Handschuhe richtig sitzen.

### Wechsel eines kontaminierten/perforierten Handschuhs während eines chirurgischen Eingriffs



9. Wenn eine Perforation in Gegenwart von Flüssigkeit erfolgt, ist an der Perforationsstelle ein dunkel gefärbter Fleck durch den Außenhandschuh sichtbar.



10. Ziehen Sie den Außenhandschuh aus, indem Sie die Manschette über die Handfläche ziehen, so dass sich der Handschuh von innen nach außen dreht. Entsorgen Sie den kontaminierten/perforierten Handschuh.



12. Prüfen Sie den Innenhandschuh auf Einstiche. Wenn sie durchstoßen sind, entfernen Sie sie und ersetzen Sie sie gemäß den örtlichen Empfehlungen. Ansonsten trocken Sie sie mit einem sterilen Tuch ab.

Öffnen Sie eine neue Handschuh-Packung der richtigen Biogel Austausch-Handschuhs, um die Genauigkeit der Farbanzeige zu erhalten. Ziehen Sie den neuen Außenhandschuh an und achten Sie darauf, dass die Manschette des Außenhandschuhs 2,5 cm weit über die Manschette des Innenhandschuhs gezogen wird, um ein Herunterrollen oder -rutschen zu vermeiden.

Eine Videoanleitung zum Anziehen von Handschuhen und OP-Mänteln finden Sie unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

\* Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2008. Mölnlycke Health Care AB.