

Die perfekte Kombination:

Verbände mit Safetac® Technologie und Tubifast®



Mextra® Superabsorbent und Tubifast®



www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG,
Brandstrasse 24, 8952 Schlitten, Tel +41 44 744 54 00
Fax: +41 44 744 54 11, Mail: info.ch@molnlycke.com
Die Namen Mölnlycke Health Care, Safetac® sowie alle
entsprechenden und genannten Logos sind weltweit
eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder
der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
©2019 Mölnlycke Health Care AB.
Alle Rechte vorbehalten. DWC0032

Mölnlycke®

Die optimale Lösung für das Sichern von Verbänden

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH
TECHNOLOGY

Elastischer, längs-
und querdehnbarer
Schlauchverband

Sicher

- Hält Verbände sicher in Position, ohne Sicherheitsnadeln oder Klebebänder verwenden zu müssen
- Produktbestandteile und Verpackung sind latexfrei

Komfortabel

- Übt keinen Druck aus und engt nicht ein
- Volle Bewegungsfreiheit und Komfort für den Patienten durch Dehnfähigkeit in beide Richtungen

Praktisch

- Schnell und einfach in der Anwendung
- Kann zugeschnitten und gewaschen werden
- in fünf farbig markierten Breiten für gute Anpassung an alle Gliedmassen

Mit Tubifast® wäre das nicht passiert:



Abdrücke, verursacht durch einen einengenden Netzverband.



Verrutschter, zu lockerer Schlauchverband



Starke Kompression durch zu enge Verbandfixierung.

Tubifast hält Verbände sicher in Position, ohne einzuengen oder Kompression zu verursachen



Viskose, Elastan und Polyamid

Keine Sicherheitsnadeln oder Klebebänder zur Sicherung notwendig.


In fünf farbig markierten Breiten erhältlich – für gute Anpassung an alle Gliedmassen unabhängig von Grösse oder Form.

Schnell und einfach in der Anwendung – zuschneiden und überstreifen für gleichmässigen, bequemen Sitz.

Dehnfähigkeit in beide Richtungen – für volle Bewegungsfreiheit und Komfort des Patienten.



Grössen- und Anwendungsübersicht

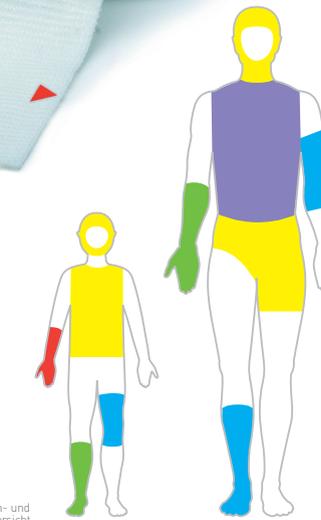

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmasse	MIGeL-Code	Pharmacode	Stück/Packung
10 m Länge					
24 34	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	35.01.08.02.1	3516715	1
24 36	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	35.01.08.03.1	3516721	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	35.01.08.05.1	3516738	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	35.01.08.06.1	3516690	1
24 44	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	35.01.08.08.1	7084193	1

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle

Tubifast® – für eine optimale Verbandsicherung

Elastischer, längs- und querdehnbarer Schlauchverband: Sicher. Komfortabel. Praktisch.




Mölnlycke®

Anwendung am Kopf



Längenabmessung: (Kopf → Hals) x 2 + 4 cm

Gelber Streifen

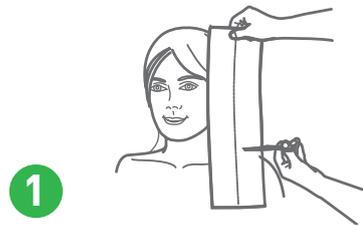

1

Messen Sie die Distanz zwischen Halsbasis und oberem Kopfe, verdoppeln Sie die Länge und geben Sie noch 3-4 cm dazu. Schneiden Sie die gewünschte Länge ab. Legen Sie **Tubifast®** mittig zusammen, sodass beide Enden gleich lang sind. Machen Sie 10 cm unter dem Falz einen 4 cm grossen Schnitt in nur eine Lage.



2

Ziehen Sie **Tubifast®** über den Kopf, sodass das Gesicht durch die Öffnung schaut. Drehen Sie das obere Ende um 360° und ziehen Sie es wie eine Mütze hinunter. Alternativ kann erst das kürzere Ende wie eine Mütze platziert und dann das längere Ende nach 360° Drehung herunter gezogen werden.



3


Tubifast® ist nun gut auf dem Kopf platziert und der Verband sitzt fest.

Anwendung am Oberkörper



Längenabmessung: (Hals → unteres Gesäss) x 1

Violetter Streifen

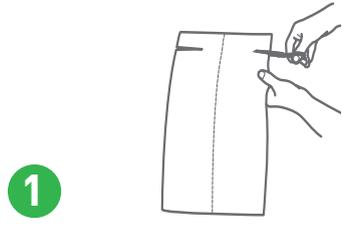


1

Schneiden Sie **Tubifast®** auf Länge der Distanz zwischen Hals bis unteres Gesäss. Machen Sie ca. 10 cm vom oberen Ende einen 3 cm grossen Schnitt.



2

Ziehen Sie **Tubifast®** über den Kopf und stecken Sie die Arme durch die Öffnungen.

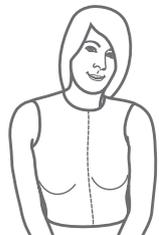

3


Ziehen Sie **Tubifast®** wie ein T-Shirt herunter. So können Verbände auf Brust oder Rücken sicher fixiert werden.

Anwendung an der Hand




Längenabmessung: (Fingerspitze → Handgelenk) x 2

Grüner Streifen

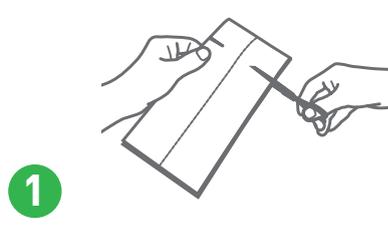

1

Schneiden Sie **Tubifast®** auf die doppelte Länge der Distanz zwischen Fingerspitze und Handgelenk. Legen Sie **Tubifast®** mittig zusammen, sodass beide Enden gleich lang sind. Machen Sie auf beiden Seiten jeweils 1 cm unter dem Falz einen 1 cm grossen Schnitt.

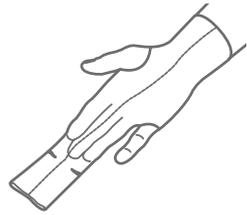

2

Ziehen Sie **Tubifast®** über Hand und Handgelenk und stecken Sie den Daumen und den kleinen Finger durch die unteren Löcher.



3


Schlagen Sie das obere Ende von **Tubifast®** zurück und führen Sie Daumen und kleinen Finger nun auch durch die oberen Löcher, sodass die 3 anderen Finger frei liegen.

Anwendung an der Hüfte



Längenabmessung: (Taille → Knie) x 1

Gelber Streifen

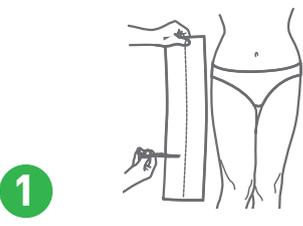

1

Messen Sie die Distanz zwischen Taille und Knie. Schneiden Sie die gewünschte Länge ab. Machen Sie 15 cm vom oberen Rand einen Schnitt, der gross genug ist, um ein Bein hindurch zu führen.



2

Steigen Sie von oben mit dem verletzten Bein durch den kompletten Verband und führen Sie das andere Bein durch die eingeschnittene Öffnung.



3


Tubifast® fixiert auf diese Weise einen Verband im Hüftbereich zuverlässig.

Anwendung am Bein



Längenabmessung: Länge des Primärverbandes + 8 cm

Blauer Streifen

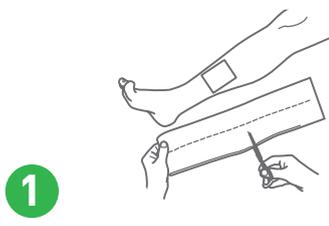

1

Messen Sie die benötigte Länge von **Tubifast®** (je nach Grösse des Primärverbandes) aus, geben Sie ca. 8 cm hinzu und schneiden Sie es ab.



2

Positionieren Sie das eine Ende von **Tubifast®** ca. 4 cm oberhalb des Primärverbandes und ziehen Sie den Schlauchverband nach unten hin glatt.



Bei speziellen Indikationen kann **Tubifast®** einen Verband auch doppellagig fixieren:
1) Länge von **Tubifast®** vor dem Abschneiden zusätzlich noch verdoppeln.
2) Nach dem Positionieren das untere Ende von **Tubifast®** nach oben hin abrollen, sodass sich der Falz ca. 4 cm unterhalb des Primärverbandes befindet.

Die ideale Kombination

Verbände mit **SafetaC TECHNOLOGY** + **Tubifast®** mit **2-WAY STRETCH TECHNOLOGY**



Mepilex Mepilex Lite

Tubifast




Mepilex Transfer Mepilex Lite

Tubifast



Mepilex Mepilex Lite

Tubifast

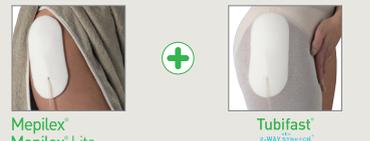

Mepilex Mepilex Lite

Tubifast



Mepilex Mepilex Lite

Tubifast



Mepilex Mepilex Lite

Tubifast



Mepilex Heel

Tubifast

Beispiele für die Verbandauswahl