


WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

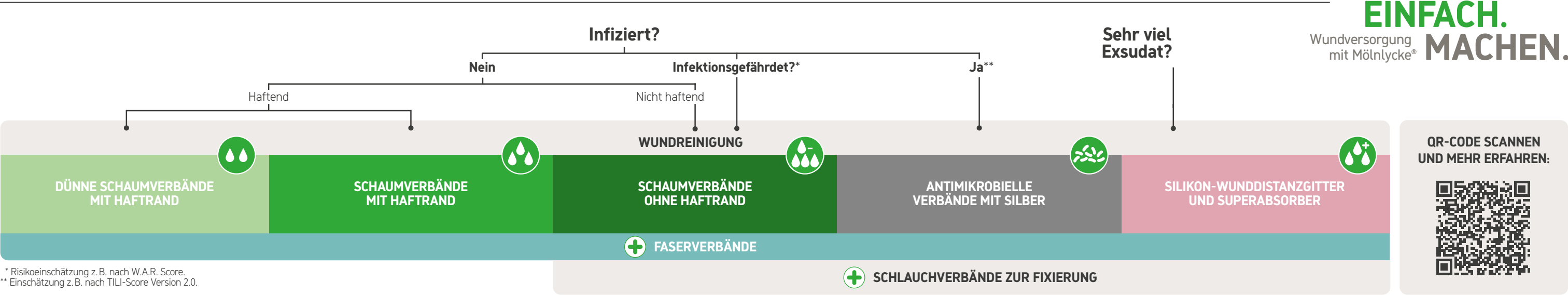

PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase / Reinigungsphase			Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelegte Wunden; frei- liegende empfindliche Strukturen: z. B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsu- dation			Feuchte (oberflächliche) Wunden		Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung
Beispiel							
Exsudation	Nicht bis wenig			Mässig bis stark bis		Wenig bis mittelstark bis	Nicht bis wenig
Ziele	• Aufweichen der Beläge • Wundreinigung • Feuchthalten			• Keimreduzierung • Wundreinigung • Exsudatmanagement • Wundrandschutz		• Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus • Exsudatmanagement • Schutz	• Schutz • Wundruhe
Schmerzen minimieren							
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen Empfehlung: Granudacyn ® Wundspüllösung						
Sauerstoff- Therapie	Wunden, deren Reduktion der Wundgrösse innerhalb von 4 Wochen weniger als 40 % beträgt: zusätzliche Verabreichung von Granulox ®						
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel		Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + Granudacyn® Wundgel	bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Exufiber® + bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Mepilex® Lite + Tubifast®
Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde	 Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag			 Exufiber® Ag+			Mepitel® Film Mepiform®
Sekundärverband	Mepilex® Lite 	Mepilex® Up 	 + Mextra®	 Mepilex® Border Flex oder Mepilex® Up oder Mepilex® Heel (speziell für die Ferse)		Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film	
Fixierung	 + Tubifast®						

LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN			VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A	CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS (HAUTRISS)
Mepitel One	Mepitel Mepilex Transfer	Mepilex Transfer Ag	geeignetes Wundantiseptikum, ggf. Granudacyn Wundspüllösung oder -gel Mepitel One Mextra Superabsorbent	Mepilex Ag	Mepilex Border Post-Op	Mepilex Lite
Mextra Superabsorbent						
Tubifast			Tubifast	Mepitel Film	Mepitel Film	Mepitel One



SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung	
Mepilex® Border Flex				
59 52 50	7,5 x 7,5 cm	35.05.03.02.1	5	ecklig
59 53 50	10 x 10 cm	35.05.03.02.1	5	
59 50 50	12,5 x 12,5 cm	35.05.03.03.1	5	
59 58 00	10 x 20 cm	35.05.03.04.1	10	
59 59 00	10 x 30 cm	35.05.03.05.1	10	
59 54 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	5	oval
59 56 00	15 x 20 cm	35.05.03.04.1	5	
58 35 00	7,8 x 10 cm	35.05.03.02.1	5	
58 33 00	13 x 16 cm	35.05.03.04.1	5	
58 34 00	15 x 19 cm	35.05.03.05.1	5	

Mepilex® Border Flex Lite

58 10 50	4 x 5 cm	35.05.03.01.1	10
58 11 00	5 x 12,5 cm	35.05.03.02.1	5
58 12 50	7,5 x 7,5 cm	35.05.03.02.1	5
58 13 50	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	5
58 15 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	5

SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mepilex® Up			
21 20 50	5 x 5 cm	35.05.03.01.1	5
21 21 55	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	5
21 22 55	10 x 20 cm	35.05.03.04.1	5
21 23 55	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	5
21 24 55	20 x 20 cm	35.05.03.06.1	5
21 25 50	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	2

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele:



Mepilex®

29 40 15	5 x 5 cm	35.05.03.01.1	5
29 41 50	10 x 12 cm	35.05.03.03.1	5
29 42 50	12 x 20 cm	35.05.03.04.1	5
29 43 50	15 x 17 cm	35.05.03.04.1	5
29 44 50	20 x 22 cm	35.05.03.06.1	5

Mepilex® Heel

(speziell für die Ferse)			
28 81 00	13 x 20 cm	35.05.03.11.1	5
28 83 00	15 x 22 cm	35.05.03.11.1	5

Mepilex® Lite

28 40 00	6 x 8,5 cm	35.05.03.02.1	5
28 41 00	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	5
28 43 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	5
28 45 00	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	4

Mepilex® Transfer

29 47 00	10 x 12 cm	35.05.03.03.1	5
29 48 00	15 x 20 cm	35.05.03.05.1	5
29 45 02	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	4

FOLIENVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mepitel® Film			
29 61 70	6 x 7 cm	35.05.10.20.1	10
29 62 70	10 x 12 cm	35.05.10.22.1	10
29 64 70	10 x 25 cm	35.05.10.23.1	10
29 66 70	15 x 20 cm	35.05.10.24.1	10

ANTIMIKROBIELLE SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mepilex® Ag			
28 70 21	6 x 8,5 cm	35.06.04.21.1	10
28 71 10	10 x 10 cm	35.06.04.22.1	5
28 72 10	10 x 20 cm	35.06.04.23.1	5
28 73 10	15 x 15 cm	35.06.04.24.1	5
28 74 10	20 x 20 cm	35.06.04.25.1	2
28 75 10	20 x 50 cm	35.06.04.25.1	2

Mepilex® Border Ag

39 52 00	7 x 7,5 cm	35.06.04.21.1	5
39 53 00	10 x 10 cm	35.06.04.22.1	5
39 54 00	15 x 15 cm	35.06.04.24.1	5

Mepilex® Transfer Ag

39 40 00	7,5 x 8,5 cm	35.06.04.21.1	10
39 41 00	10 x 12,5 cm	35.06.04.22.1	5
39 48 00	15 x 20 cm	35.06.04.24.1	10
39 45 00	20 x 50 cm	35.06.04.25.1	2

CHIRURGISCHE WUNDVERSORGUNG

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mepilex® Border Post-Op			
49 61 00	6 x 8 cm	35.05.03.02.1	10
49 62 00	9 x 10 cm	35.05.03.03.1	10
49 63 00	10 x 15 cm	35.05.03.03.1	10
49 64 00	10 x 20 cm	35.05.03.04.1	10
49 64 50	10 x 25 cm	35.05.03.04.1	10
49 66 00	10 x 30 cm	35.05.03.05.1	10
49 66 50	10 x 35 cm	35.05.03.05.1	5

SILIKON-WUNDDISTANZGITTER

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mepitel®			
29 05 00	5 x 7 cm	35.05.08.01.1	5
29 07 00	8 x 10 cm	35.05.08.02.1	5
29 10 00	12 x 15 cm	35.05.08.03.1	5
29 20 30	20 x 32 cm	35.05.08.05.1	5

Mepitel® One

Mit Abziehhilfe (Skin Tears)			
28 91 70	6 x 7 cm	35.05.08.01.1	5
28 92 70	9 x 10 cm	35.05.08.02.1	5
28 94 70	13 x 15 cm	35.05.08.03.1	5
Ohne Abziehhilfe			
28 90 00	5 x 7 cm	35.05.08.01.1	5
28 92 00	8 x 10 cm	35.05.08.02.1	5
28 94 00	12 x 15 cm	35.05.08.03.1	5
28 97 00	17 x 25 cm	35.05.08.04.1	5
28 97 50	27,5 x 50 cm	35.05.08.05.1	2

FIXIERUNG

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmasse	MiGeL	Stück/ Packung
Tubifast®				
10 m Länge, auf Rolle - unsteril				
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	35.01.08.02.1	1
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	35.01.08.03.1	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	35.01.08.05.1	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	35.01.08.06.1	1
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	35.01.08.08.1	1
5 m Länge, auf Rolle - unsteril				
35 55	Grün (5 cm)	14–24 cm	35.01.08.03.1	6
35 56	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	35.01.08.05.1	6
35 57	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	35.01.08.06.1	6
35 58	Violett (20 cm)	64–130 cm	35.01.08.08.1	6

GELBILDENDER FASERVERBAND

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Exufiber®			
70 99 00	5 x 5 cm	35.05.07.01.1	10
70 99 01	10 x 10 cm	35.05.07.02.1	10
70 99 03	15 x 15 cm	35.05.07.04.1	10
70 99 04	20 x 30 cm	35.05.07.05.1	5
70 99 06	4,5 x 20 cm	35.05.07.09.1	10
Tamponade			
70 99 08	1 x 45 cm	35.05.07.09.1	5
70 99 09	2 x 45 cm	35.05.07.09.1	5

Exufiber® Ag+

60 34 01	5 x 5 cm	35.06.07.20.1	10
60 34 02	10 x 10 cm	35.06.07.22.1	10
60 34 03	15 x 15 cm	35.06.07.24.1	10
60 34 05	4,5 x 20 cm	35.06.07.28.1	10
60 34 07	20 x 30 cm	35.06.07.26.1	5
Tamponade			
60 34 00	2 x 45 cm	35.06.07.28.1	5

NARBENBEHANDLUNG

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mepiform®			
29 36 00	4 x 30 cm	n/a	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	n/a	5
29 38 00	10 x 18 cm	n/a	5

SUPERABSORBER

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Mextra® Superabsorbent			
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	35.05.05.03.1	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	35.05.05.04.1	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	35.05.05.04.1	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	35.05.05.05.1	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	35.05.05.06.1	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	35.05.05.06.1	10
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	35.05.05.08.1	10

ALGINATE

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Packung
Melgisorb® Plus®			
25 20 00	5 x 5 cm	35.05.06.01.1	10
25 22 00	10 x 10 cm	35.05.06.02.1	10
25 25 00	10 x 20 cm	35.05.06.03.1	10
Tamponade			
25 35 00	3 x 45 cm	35.05.06.08.1	5

SAUERSTOFF-THERAPIE

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Stück/ Karton
Granulox® Hämoglobin-Spray®			
36 00 01	12 ml / ca. 30 Anwendungen	n/a	6

WUNDREINIGUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grösse	MiGeL	Stück/ Karton
Granudacyn® Wundspüllösung und Gel®				
36 01 50	Wundspüllösung 50ml	50 ml	n/a	20
36 01 00	Wundspüllösung 250ml	250 ml	99.12.03.00.1	15
36 01 01	Wundspüllösung 500ml	500 ml	99.12.04.00.1	12
36 01 02	Wundspüllösung 1000ml	1000 ml	99.12.05.00.1	6
36 01 03	Wundspüllösung NPWT 500ml	500 ml	99.12.04.00.1	12
36 01 04	Wundspüllösung NPWT 1000ml	1000 ml	99.12.05.00.1	6
36 01 07	Wundgel 50 g	50 g	35.05.09.11.1	12
36 01 08	Wundgel 100 g	100 g	35.05.09.11.1	12
36 01 06	Wundgel 250 g	250 g	35.05.09.12.1	15

WUNDVERSORGUNG



Sofern nicht aufgeführt, sind alle Produkte steril – einzeln verpackt.

Kontaktieren Sie uns unter +41 44 744 54 00 oder info.ch@molnlycke.com für die aktuelle MiGeL Übersichtsliste.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.
Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com.
Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
CH-DWC0090



Stand: September 2025