

BARRIER® EasyWarm®+

Aktiv selbstwärmende Einweg-Patientendecke



Die BARRIER® EasyWarm®+ Patientendecke erwärmt sich innerhalb von 30 Minuten vollständig und hält die Temperatur über einen Zeitraum von bis zu 10 Stunden.

- Hilft, eine Hypothermie in der gesamten perioperativen Phase zu verhindern.
- Die Decke erwärmt sich sofort nach Entnahme aus der Verpackung.
- Der obere und untere Teil der Decke kann leicht durch den Klettverschluss getrennt und wieder zusammengefügt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichsten Lagerungen.
- Ohne Zubehör einsetzbar.

Hinweise zum Gebrauch



1. Öffnen Sie die Verpackung an der Einkerbung in der oberen linken Ecke. Entnehmen Sie die Patientendecke BARRIER® EasyWarm®+ aus der Umverpackung.



2. Öffnen und entfalten Sie die BARRIER EasyWarm+ Patientendecke vollständig und achten Sie darauf, die Decke nicht doppelt zu legen. Die Decke erwärmt sich an der Luft innerhalb von 30 Minuten vollständig und hält die Temperatur über einen Zeitraum von bis zu 10 Stunden.



3. Legen Sie die BARRIER EasyWarm+ Patientendecke mit den Wärmepads nach oben auf. Die weiße Seite zeigt zum Patienten. Vermeiden Sie zusätzliches Gewicht auf der Decke.



4. Während und nach dem Eingriff sowie bei Eingriffen an Händen/ Armen und Kopf legen Sie die BARRIER EasyWarm+ Patientendecke auf den gesamten Körper.



5. Bei Eingriffen im unteren abdominalen Bereich und an den unteren Extremitäten teilen Sie die BARRIER EasyWarm+ Patientendecke und legen den oberen Teil über Brust und Extremitäten.



6. Bei Eingriffen oberhalb des Genitalbereichs teilen Sie die BARRIER EasyWarm+ Patientendecke und legen den unteren Teil über Hüftbereich und Beine.



7. Bei Eingriffen im abdominalen Bereich teilen Sie die BARRIER EasyWarm+ Patientendecke und legen den oberen Teil über Brust und Extremitäten, den unteren Teil über Hüftbereich und Beine.



8. Der obere und untere Teil der Decke kann leicht durch den Klettverschluss getrennt und wieder zusammengefügt werden. (Der untere Teil kann zusätzlich an der dafür vorgesehenen Markierung in zwei Teile geschnitten werden.) Dies ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichsten Lagerungen.

Anwendungshinweise

- Anwendung nur unter ärztlicher oder pflegerischer Aufsicht.
- Die Decke mit den Wärmepads nach oben auflegen. Die weiße Seite zeigt zum Patienten. Die richtige Seite ist mit „THIS SIDE UP“ auf der Decke gekennzeichnet.
- Die Decke nicht doppelt legen.
- Zusätzliches Gewicht oder Druck auf die Decke, z. B. durch medizinische Instrumente, vermeiden. Hände, Arme und Gliedmaßen des anästhesierten Patienten nicht auf die Decke legen.
- Mögliche Hautreaktionen gemäß den Krankenhausroutinen regelmäßig überprüfen.
- Zur Anwendung bei Personen ab 18 Jahren.

Warnhinweise/Kontraindikationen

- Nicht für Patienten mit schwerer Beeinträchtigung der peripheren Zirkulation (auch der Haut) geeignet.
- Die Decke nicht in einer sauerstoffreichen Umgebung verwenden, d. h. die Decke darf nicht in der Überdruckmedizin verwendet werden und die Wärmepads dürfen nicht in Kontakt mit dem Luftstrom sauerstoffbasierter Therapien oder Geräte kommen.
- Die Wärmepads sind magnetisch und nicht lichtdurchlässig. Die Decke vor MRT- oder Röntgenuntersuchungen entfernen.
- Durch die Decke erzeugte Wärme kann bei transdermalen Medikationssystemen (Patches) zu einer erhöhten Medikamentenabgabe führen.

BARRIER® EasyWarm®+ Aktiv selbstwärmende Patientendecke

Art.- Nr.	Produkt	Material	Verpackung	VSK
629910	12 luftaktivierte Wärmepads (13 cm x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind. Die Größe der Decke beträgt 110/150 cm x 200 cm.	Verschiedene Lagen aus SMS (Polypropylen). Die einzelnen Lagen sowie die Taschen sind mit Polyester-/Baumwollgarn miteinander vernäht. Die Wärmepads bestehen aus luftdurchlässigen Beuteln, die Aktivkohle, Ton, Salz, Wasser und Eisenpulver enthalten.	Vakuumverpackt in einem luftdichten Polymerbeutel. Die Beutel sind mit Luftpolsterfolie in einem Versandkarton eingeschlagen.	7 Stück

Lagerungen bei verschiedenen Eingriffen

Die BARRIER® EasyWarm®+ Patientendecke ist flexibel und für den Einsatz bei unterschiedlichsten Eingriffen geeignet. Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen, wie die Patientendecke bei den gängigen Eingriffen eingesetzt werden kann.



Abdominalchirurgie



Laparoskopische Eingriffe



Eingriffe am Knie



Eingriffe an der Schulter



Eingriffe an der Schulter



Eingriffe an der Wirbelsäule



Urologie/Gynäkologie



Urologie/Gynäkologie



Urologie/Gynäkologie



Eingriffe an der Hüfte



Eingriffe an der Hüfte



HNO-Chirurgie

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEUTSCHLAND Telefon +49 211 920 880

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, ÖSTERREICH Telefon +43 1 278 85 42

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SCHWEIZ Telefon +41 44 744 54 00

Die Marken Mölnlycke, BARRIER und EasyWarm sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEIM003050

