

Avance® Solo Adapt

Das Avance® Solo Adapt Einweg-Unterdruck-Wundtherapiesystem ist für die Anwendung bei Druckulzera indiziert, mit dem Ziel, eine schnellere Heilung zu fördern und das Infektionsrisiko zu reduzieren. Die Patientenmobilität wird kaum eingeschränkt.

1. Pumpe

- Erzeugt für 14 Tage einen kontinuierlichen Unterdruck von -125mmHg¹.
- Optische und akustische Warnhinweise für Leckage, Blockade und niedrigem Batteriestand. Probleme können sofort behoben werden^{1,2}.
- Tragbar und leicht - minimiert die Einschränkung der Patientenmobilität^{1,3}.

2. 50ml Kanister

- Kanister kann vom Anwender und Patient gewechselt werden^{4,5}.

3. CFM Technologie™


- Kontrollierter Lufteinlass sorgt für einen stabilen Unterdruck an der Wunde^{6,7,8}.

4. Avance® Solo Adapt Wundfüller

- Polyurethanschaum, welcher als Wundfüller dient und auf die Grösse der Wunde zugeschnitten werden kann.
- Transportiert das Exsudat von der Wunde zum Avance® Solo Adapt Transfer-Port.

5. Avance® Solo Adapt Folie mit Safetac® Technologie

- Flexible Folie mit Safetac Beschichtung, welche eine effektive Abdichtung für die Unterdrucktherapie erzeugt^{9,10}.

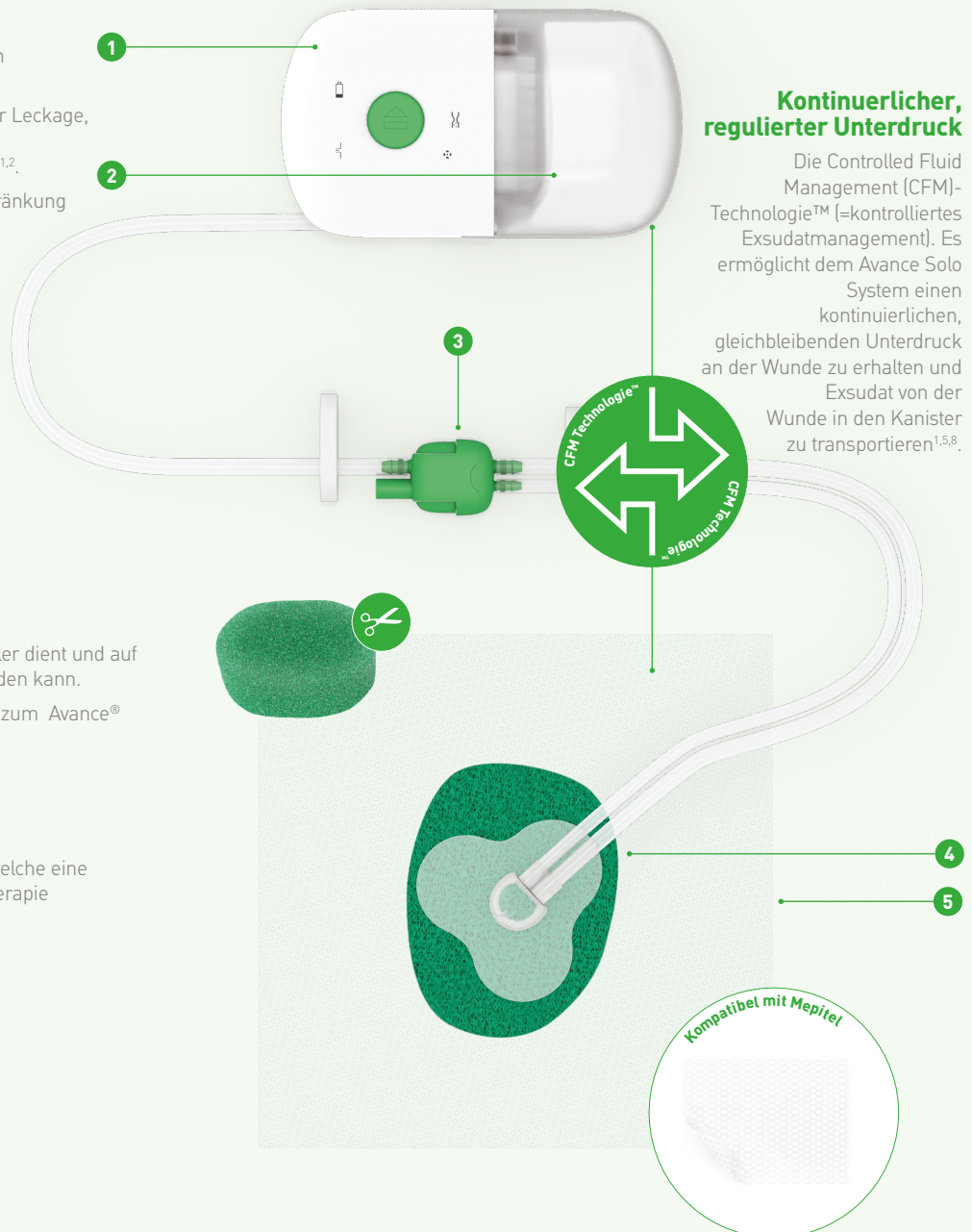

Kontinuierlicher, regulierter Unterdruck

Die Controlled Fluid Management (CFM)-Technologie™ (=kontrolliertes Exsudatmanagement). Es ermöglicht dem Avance Solo System einen kontinuierlichen, gleichbleibenden Unterdruck an der Wunde zu erhalten und Exsudat von der Wunde in den Kanister zu transportieren^{1,5,8}.

Avance® Solo Adapt

Einweg-Unterdrucktherapie ohne Kompromisse


Mölnlycke®

Was ist eine Unterdruck-Wundtherapie?

Die Unterdruck-Wundtherapie ist eine Methode zur Behandlung von Wunden mit Hilfe von Sogwirkung. Der Verband wird luftdicht angebracht und die Pumpe erzeugt einen Unterdruck. Die Wunde wird damit von überschüssigem Exsudat und Flüssigkeiten befreit.

Vorteile von Avance® Solo Adapt

- CFM Technologie™ – kontinuierlicher Unterdruck an der Wunde^{6,7,8}.
- Optimisiertes Exsudatmanagement^{6,7,8}.
- Das Kit enthält einen anpassbaren 3cm Schaum, der in Verbindung mit Mepitel® verwendet werden kann. Ein mögliches Verkleben des Schaums mit dem Gewebe wird vermieden.
- Visuelle und akustische Warnhinweise der Pumpe tragen dazu bei, dass Therapieausfälle oder Systemprobleme sofort behoben werden können^{1,2}.

Regelmässiges, pulsierendes Pumpen

Das regelmässige, pulsierende Geräusch der zyklisch arbeitenden Pumpe ist normal und bestätigt das Funktionieren des Geräts^{2,5,9}.

Anwendungsgebiet



dNPWT – Druckulzera

Das Avance Solo Adapt System ist für die Anwendung bei Druckulzera indiziert.

Vorsichtsmassnahmen

Sollten Probleme wie Blutungen, erhöhter Blutdruck oder mit dem Gerät selbst auftreten, halten Sie Rücksprache mit dem verordnenden Arzt. Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen finden Sie in der medizinischen Gebrauchsanweisung, welche der Produktverpackung beiliegt.

Avance Solo Adapt Bestellinformation

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt Set	Stück/RET
9994152	Avance Solo Adapt Starter Set	Pumpe + 50ml Kanister + Transfer-Port + 4 x AA Batterien + Safetac® Folienverband + Wundfüller + Gürtel-Clip	1
994152	Avance Solo Adapt Verbandset	Safetac® Folienverband + Wundfüller + Transfer-Port	5
994000	Avance Solo Adapt Folienverband	Safetac® Folienverband	5

Quellen: 1. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 16). 2. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 17). 3. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 21). 4. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 14). 5. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 15). 6. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 10). 7. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 18). 8. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 13). 9. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 23). 10. Avance Solo Adapt CMM Data on file (ref 22).



Scannen Sie den QR-Code, und erfahren Sie mehr auf unserer Website.



Erfahren Sie mehr unter www.avancesolo.com/de-ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com. Die Marken Mölnlycke, Avance und Safetac sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. HQIM002838


Mölnlycke®