

Moderne Wundversorgung

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex XT		
21 10 15	5 x 5 cm	5
21 11 00	10 x 10 cm	5
21 12 00	10 x 20 cm	5
21 13 00	15 x 15 cm	5
21 14 00	20 x 20 cm	5
21 15 00	20 x 50 cm	2

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex		
29 40 15	5 x 5 cm	5
29 41 50	10 x 12 cm	5
29 42 50	12 x 20 cm	5
29 43 50	15 x 17 cm	5
29 44 50	20 x 22 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Heel		
28 81 00	13 x 20 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Lite		
28 40 00	6 x 8,5 cm	5
28 41 00	10 x 10 cm	5
28 43 00	15 x 15 cm	5
28 45 00	20 x 50 cm	4

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Transfer		
29 47 00	10 x 12 cm	5
29 48 00	15 x 20 cm	5
29 45 02	20 x 50 cm	4

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Produkte steril und einzeln verpackt.

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung	
Mepilex Border Flex			
59 52 00	7,5 x 7,5 cm	5	
59 53 00	10 x 10 cm	5	
59 50 00	12,5 x 12,5 cm	5	
59 54 00	15 x 15 cm	5	
59 56 00	15 x 20 cm	5	
Oval	58 35 00	7,8 x 10 cm	5
	58 33 00	13 x 16 cm	5
	58 34 00	15 x 19 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border Lite		
28 10 00	4 x 5 cm	10
28 11 00	5 x 12,5 cm	5
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	5
28 13 00	10 x 10 cm	5
28 15 00	15 x 15 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border		
29 52 00	7,5 x 7,5 cm	10
29 53 00	10 x 10 cm	10
29 54 00	15 x 15 cm	10
29 56 00	15 x 20 cm	10
29 58 00	10 x 20 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border Sacrum		
28 20 50	16 x 20 cm	5
28 24 50	22 x 25 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border Sacrum Ag		
38 20 00	18 x 18 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border Heel		
28 27 50	22 x 23 cm	6

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border Post-OP		
49 61 00	6 x 8 cm	10
49 62 00	9 x 10 cm	10
49 63 00	10 x 15 cm	10
49 64 00	10 x 20 cm	10
49 64 50	10 x 25 cm	10
49 66 00	10 x 30 cm	10
49 66 50	10 x 35 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Ag		
28 70 21	6 x 8,5 cm	5
28 71 10	10 x 10 cm	5
28 72 10	10 x 20 cm	5
28 73 10	15 x 15 cm	5
28 74 10	20 x 20 cm	5
28 75 10	20 x 50 cm	2

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Border Ag		
39 52 00	7,5 x 7,5 cm	5
39 53 00	10 x 10 cm	5
39 54 00	15 x 15 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepilex Transfer Ag		
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	10
39 41 00	10 x 12,5 cm	5
39 48 00	15 x 20 cm	10
39 45 00	20 x 50 cm	2

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepitel		
29 05 00	5 x 7 cm	5
29 07 00	8 x 10 cm	5
29 10 00	12 x 15 cm	5
29 20 30	20 x 32 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung	
Mepitel One			
28 90 00	5 x 7 cm	5	
28 92 00	8 x 10 cm	5	
28 94 00	12 x 15 cm	5	
28 97 00	17 x 25 cm	5	
Skin Tears	28 91 70	6 x 7 cm	5
	28 92 70	9 x 10 cm	5
	28 94 70	13 x 15 cm	5

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepitel Film		
29 61 70	6 x 7 cm	10
29 62 70	10 x 12 cm	10
29 64 70	10 x 25 cm	10
29 66 70	15 x 20 cm	10

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepiform		
29 36 00	4 x 30 cm	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	5
29 38 00	10 x 18 cm	5

unsteril einzeln verpackt

Art.-Nr.	Grösse	Stück / Packung
Mepitac		
29 83 00	2 x 300 cm	1
29 84 00	4 x 150 cm	1

unsteril auf Rolle

Moderne Wundversorgung

Mepilex® XT

Silikonbeschichteter, absorbierender PU-Schaumverband für dünn- bis zähflüssiges Exsudat.



ANWENDUNG:

Für leicht bis mittelstark exsudierende und akute wie auch chronische Wunden in allen Heilungsstadien. Effektive Aufnahme aller Arten von Exsudat; dünn- bis zähflüssiges wie auch eiweißhaltiges Exsudat.

Tragedauer: Mehrere Tage

Mepilex® Lite

Dünnere, silikonbeschichteter PU-Schaumverband



ANWENDUNG:

Für akute (z.B. Verbrennungen) und chronische Wunden (z.B. Ulzera) mit keiner bis leichter Exsudation.

Ideale Anwendung auch im Finger-/Zehenbereich, für Bestrahlungs- und EB-Patienten.

Tragedauer: bis zu 7 Tage

Mepitel®

Beidseitig haftende Silikonwundauflage

Geeignet für Schürfwunden und Verbrennungen bis Grad 2.



ANWENDUNG:

Die Wundauflage kann einige Tage belassen werden, während der Deckverband je nach Bedarf gewechselt werden kann.


Für:
Akutverletzungen (Abschürfungen, Verbrennungen, etc.)
chronische Wunden (Ulzera, Dekubitus, etc.),
OP-Wunden (Wundnaht, Amputationen, etc.).

Tragedauer: bis zu 14 Tage

Mepilex® Transfer

Drainagefähige Wundauflage

Besonderheit: Exsudatableitung nur in vertikaler Richtung

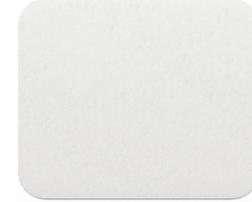

ANWENDUNG:

Die Wundauflage kann einige Tage belassen werden, während der Deckverband je nach Bedarf gewechselt werden kann.

Speziell für ulzerierende Karzinome und großflächige Verbrennungen und chronische Wunden (diabetisches Fußsyndrom, Ulcus cruris venosum, Lymphödeme, usw.) geeignet.


Mepilex® Transfer Ag: Für kritisch kolonisierte (hohes Infektrisiko) oder bereits leicht infizierte akute und chronische Wunden geeignet.

Tragedauer
Mepilex Transfer: bis zu 7 Tage
Mepilex Transfer Ag: bis zu 14 Tage

Mepitel® One

Einseitig haftende Silikonwundauflage


Geeignet für Schürfwunden, Verbrennungen bis Grad 2 und Hautrisse.

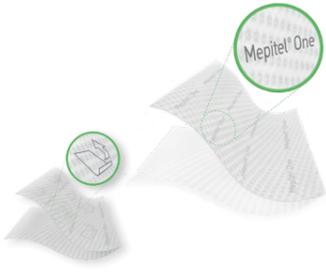

Mepilex® Transfer Ag

Antimikrobielle, drainagefähige Wundauflage mit Silber

Besonderheit: Exsudatableitung nur in vertikaler Richtung

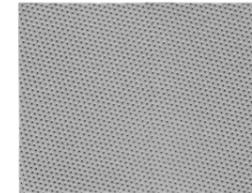

Tragedauer
Mepilex Transfer: bis zu 7 Tage
Mepilex Transfer Ag: bis zu 14 Tage

Mepilex® Border Sacrum

Selbsthaftender Schaumverband zur Behandlung und Prävention



ANWENDUNG:

Für mittel bis stark exsudierende chronische und akute Wunden.

Geeignet für Dekubitusprophylaxe.

Sehr hohes Absorptionsvermögen durch Superabsorber für längere Verbandswechselintervalle und Kosteneffizienz.

Tragedauer Prävention: bis die Haftung nachlässt

Tragedauer Behandlung: bis zu 7 Tage

Mepilex® Ag

Antimikrobieller, silikonbeschichteter PU-Schaumverband



ANWENDUNG:

Für kritisch kolonisierte (hohes Infektrisiko) oder bereits leicht infizierte akute und chronische Wunden.

Tragedauer: bis zu 7 Tage

Mepilex® Border Heel

Selbsthaftender Schaumverband zur Behandlung und Prävention



Mepilex® Border Flex

Flexibler Schaumverband mit Hafrand



ANWENDUNG:

Schnelle und sichere Aufnahme aller Exsudatarten - auch visköses Exsudat. Weiterleitung und sicherer Einschluss von Bakterien, sowie optimale Anpassungsfähigkeit und hoher Patientenkomfort durch Flex-Cuts.

Tragedauer: bis zu 7 Tage

Mepilex® Border Lite

Dünnere PU-Schaumverband mit Hafrand



ANWENDUNG:

Ideal für kleinere Verletzungen (Abschürfungen, Fingerverletzungen, Blasen etc.), zum Schutz fragiler Haut oder bei Kleberunverträglichkeit.

Tragedauer: bis zu 7 Tage

Mepilex® Border Ag

Antimikrobieller all-in-one PU-Schaumverband



ANWENDUNG:

Für kritisch kolonisierte (hohes Infektrisiko) oder bereits leicht infizierte Wunden mit stärkerer Exsudation.

Tragedauer: bis zu 7 Tage

Mepilex® Border Post-OP

Selbsthaftender, flexibler all-in-one Verband

Bietet eine besonders hohe Flexibilität über Gelenken.



ANWENDUNG:

Flexibles Kissen mit Superabsorberfasern für stark exsudierende akute (z.B. Schnitt- und Schürfwunden) oder chirurgische Wunden (z.B. nach Hüft- oder Knieoperationen, Amputationen).

Tragedauer: bis zu 7 Tage

Mepitel® Film

Hautschonender Folienverband



ANWENDUNG:

Geeignet für oberflächliche, nicht exsudierende Wunden, zur Fixation von Primärverbänden und als Hautschutz.

Tragedauer: Mehrere Tage

Mepitac®

Weicher, silikonbeschichteter Fixierverband



ANWENDUNG:

Zur sanften Fixierung oder als Hautschutz z.B. unter Sauerstoffbrille.

Tragedauer: Mehrere Tage

Mepiform®

Selbsthaftender Silikonverband zur Narbenbehandlung



ANWENDUNG:

Zur Prävention und Behandlung von Narben.

Tragedauer: bis die Haftung nachlässt