

Tubifast® Bekleidung mit TwoWay Stretch® Technologie

Konfektionskleidung

Die SoftSeam Technology® trägt dazu bei, Reizungen von empfindlicher Haut zu reduzieren¹



Die Tubifast® Bekleidung mit TwoWay Stretch® Technologie besteht aus einem Sortiment an konfektionierten¹ Kleidungsstücken für den Einsatz bei feuchten oder trockenen Wickeln³⁻⁵ sowie bei der Fixierung von Verbänden⁵.

So funktioniert die Tubifast® Bekleidung mit TwoWay Stretch® Technologie

Die konfektionierte¹ Tubifast Bekleidung mit TwoWay Stretch Technologie zum Fixieren von Verbänden⁵ und für feuchte oder trockene Wickel²⁻⁵ ist als langärmeliges Unterhemd, Unterhemd mit integrierten Fäustlingen (nur für 6-24 Monate), Strumpfhose, Beinling, Socken, Handschuh und Patch Wrap® erhältlich. Für Kinder ab sechs Monaten.

Ohne Einsatz von Klebeband, Sicherheitsnadeln oder Bändern² sind Tubifast-Kleidungsstücke mit TwoWay-Stretch-Technologie einfach anzulegen⁵, und ihre TwoWay-Stretch-Struktur¹ sorgt für vollständige Bewegungsfreiheit. Mit ihrem hohen Tragekomfort sowohl unter Nachtwäsche als auch unter normaler Kleidung¹ tragen sie zu voll aktiven Tagen und erholsamen Nächten bei.

Vorteile der Tubifast-Bekleidung mit TwoWay-Stretch-Technologie

- Flache Nähte tragen dazu bei, Reizungen von empfindlicher Haut zu vermeiden¹
- Komfortable Möglichkeit, um Wickel anzulegen²⁻⁵
- Hoher Tragekomfort sowohl unter Nachtwäsche als auch unter normaler Kleidung¹
- Bewegungsfreiheit¹
- Erhältlich als langärmeliges Unterhemd, Unterhemd mit integrierten Fäustlingen, Strumpfhose, Beinling, Socken, Handschuh und Patch Wrap

Materialeigenschaften

Viskose, Elastan und Polyamid

Waschanleitung



WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, die Grösse der jeweiligen Tubifast-Bekleidung mit TwoWay-Stretch-Technologie sowohl nach den Massen als auch nach dem Alter zu wählen. Im Zweifelsfall sollte die nächstgrössere Grösse gewählt werden (z. B. wenn das Kind eine Windel mit der Tubifast-Bekleidung mit TwoWay-Stretch-Technologie trägt, berücksichtigen Sie dies bitte bei der Wahl der Grösse).

Literatur: 1. Mölnlycke Health Care. Interne Daten. 2. Choi J-W, Kang M-J, Lew B-L, Sim W-Y. Efficacy and utility of wet wrap dressing for patients with pediatric atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;79(3):AB122. 3. He H, Koh MJA, Lee HY, Ang SB. Pilot study of a customized nanotextile wet garment treatment on moderate and severe atopic dermatitis: A randomized clinical trial. Pediatric Dermatology. 2019. 4. Hon KLE, Wong KY, Cheung LK, Ha G, Lam MCA, Leung TF, et al. Efficacy and problems associated with using a wet-wrap garment for children with severe atopic dermatitis. Journal of Dermatological Treatment. 2007;18(5):301-5. 5. Cross-sectional observational study report Epidermolysis Bullosa. PD-566181 Rev 01. 2019.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com
Die Marken, Namen und Logos von Mölnlycke Tubifast, SoftSeam Technology, Patch Wrap und Epaderm sind global eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. HQIM000404

Anwendungsbereiche

Feuchte Wickel sind eine Therapie, die bei der Behandlung des atopischen Ekzems (Neurodermitis) eingesetzt wird, wo ein Emolliens unter Fixierbandagen angewendet wird. Ein Emolliens wird auf die betroffene Haut aufgetragen, die dann mit einem feuchten Tubifast-Kleidungsstück mit TwoWay-Stretch-Technologie abgedeckt wird. Das Emolliens und die feuchte Lage wirken zusammen und halten die Haut feucht. Darüber hinaus helfen sie dabei, Entzündungen zu reduzieren.

Das befeuchtete Tubifast-Kleidungsstück dient auch als Fixation, so bleibt das Emolliens mit der Haut in Kontakt. Anschliessend wird eine zweite, trockene Lage angelegt, welche die Kleidung des Patienten trocken hält. So wird weiteres Kratzen und damit mögliche Verletzungen oder eine Verschlimmerung der Hauterkrankung verhindert.

Das Anlegen eines trockenen Wickels verläuft ähnlich wie bei feuchten Wickeln. Ein Emolliens wird auf die betroffene Haut aufgetragen, die dann mit einer einzelnen trockenen Lage eines Tubifast-Kleidungsstücks mit TwoWay-Stretch-Technologie abgedeckt wird.

Bestellinformationen für Tubifast-Bekleidung mit TwoWay-Stretch-Technologie

	Alter	Art.-Nr.	Stk/IV
Unterhemden mit integrierten Fäustlingen	6–24 Monate	992007	6
Unterhemden	2–5 Jahre	992008	6
	5–8 Jahre	992009	6
	8–11 Jahre	992010	6
	11–14 Jahre	992011	6
Strumpfhosen	6–24 Monate	992012	6
	2–5 Jahre	992013	6
Strümpfe	5–8 Jahre	992014	6
	8–11 Jahre	992015	6
	11–14 Jahre	992016	6
Socken	2–14 Jahre	992017	6
Handschuhe	Kind XS	5922	6
	Kind S	5923	6
	Kind M/L Erwachsener S/M	5921	6
	Erwachsener M/L	5920	6